



Tarjeta de Acciones Específicas

Preparación del detergente enzimático para limpieza y desinfección  
de dispositivos médicos reusables en el punto de atención  
Pacientes sospechosos y confirmados de COVID 19

- Utilizar el Equipo de Protección Personal completo.
- Realizar Higiene de Manos con agua y jabón.
- Verificar la fecha de caducidad en el envase de origen del detergente enzimático seleccionado antes de prepararlo.
- Anotar en un membrete la fecha de apertura y colóquelo en un lugar visible del envase.
- Preparar el detergente enzimático en contenedores de plástico con agua a temperatura y dilución recomendada por el fabricante.
- Marcar el contenedor de plástico seleccionado para preparar la solución, de acuerdo a su capacidad en varios niveles de acuerdo a los litros que corresponden por mililitros del detergente enzimático, para asegurar la dilución correcta.
- Consultar la ficha técnica con especificaciones del fabricante sobre el manejo de los dispositivos médicos para asegurar el manejo correcto durante el proceso de lavado, desinfección y secado.
- Colocar en la parte exterior del contenedor un membrete con fecha, hora y responsable de la preparación.
- Mantener el contenedor con la solución desinfectante, con la tapa cerrada.
- Desechar la solución desinfectante, cuando caduque su efectividad, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Realizar Higiene de Manos con agua y jabón al concluir la preparación del detergente enzimático.