



Tarjeta de Acciones Específicas

Limpieza y desinfección de dispositivos médicos reusables en el punto de atención

Paciente sospechoso y confirmado de COVID 19

Los dispositivos médicos reusables utilizados para la atención de los pacientes son considerados críticos.

- Usar el Equipo de Protección Personal completo para efectuar la limpieza y desinfección de los dispositivos.
- Lavar los dispositivos médicos de acuerdo al tipo de material: acero inoxidable, poliméricos, vidrio, etc. con jabón enzimático según las especificaciones del fabricante, ponga especial atención en cremalleras y dientes .
- Enjuagar los dispositivos médicos, ponga especial atención en la completa eliminación de residuos del desinfectante y de material orgánico a través de múltiples enjuagues.
- Sumergir los dispositivos médicos de manera completa en la solución desinfectante que haya seleccionado.
- Mantener sumergidos los dispositivos médicos el tiempo necesario, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, poner especial atención en el tiempo, temperatura y concentración del desinfectante.
- Mantener tapado el recipiente que contiene la solución desinfectante.
- Realizar cambio del segundo par de guantes.
- Enjuagar los dispositivos médicos con agua estéril para la remoción de cualquier remanente de desinfectante luego de cumplido el tiempo de desinfección.
- Secar los dispositivos médicos con un paño exclusivo.
- Colocar los dispositivos médicos en una bolsa de RPBI, elaborar una etiqueta con la leyenda "Dispositivos contaminados COVID-19", anotar los siguientes datos: Fecha, servicio, cantidad y tipo de dispositivos, nombre de la enfermera responsable del proceso y adherir a la bolsa de plástico que contiene los dispositivos contaminados.
- Realice higiene de manos con agua y jabón.

**Nota:**

- Manejar con estricta precaución los objetos punzocortantes y eliminarlos de manera segura en el contenedor de RPBI.